



VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN.

Gern sind wir auch weiterhin für Sie da,
wenn es um ein schönes und gesundes Lächeln geht.

IHR PRAXISTEAM



**ERFAHREN SIE MEHR AUF
OPALESCENCE.COM/DE**

UPP 230-DE 05-2021

© 2021 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

 FOLGEN SIE UNS!



**#1
IN DER
PROFESSIONELLEN
ZAHNAUFHELLUNG
WELTWEIT**



**ANWEISUNGEN FÜR DIE ZAHNAUFHELLUNG
ZU HAUSE MIT OPALESCENCE GO™**



ZAHNAUFHELLUNG MIT OPALESCENCE GO™

□ Opalescence Go™ 6%: Tragezeit 60-90 Minuten/Tag*

*Sofern nicht anders empfohlen.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben sich zu einer Zahnaufhellung mit Opalescence Go entschieden, die vorwiegend zu Hause durchzuführen ist. Bitte beachten Sie bei der Anwendung folgende Punkte:



Sie sollten Ihre Zähne vor der Anwendung putzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Nehmen Sie ein neues Go-UltraFit Tray aus der Blisterpackung (U = Upper = Oberkiefer; L = Lower = Unterkiefer). Sie können Ober- und Unterkiefer-Folien zu verschiedenen Zeiten tragen.



Setzen Sie das UltraFit Tray in den Mund ein und platzieren Sie es mittig auf den Zähnen.




Saugen Sie die Innenfolie leicht an, damit das Tray mit dem Aufhellungsgel Kontakt mit den Zähnen hat.



Entfernen Sie das äußere Tray – dieses dient nur zum Einsetzen und kann nun entsorgt werden. Die transparente Schiene mit dem Gel bleibt im Mund. Erneut leicht ansaugen. Adaptieren Sie nun die flexible Innenfolie an Ihre Zahnreihe durch Zunge und „Kussmund“.



Zur Tragezeit und -dauer folgen Sie den Anweisungen, die Sie von uns erhalten haben. Anschließend entfernen und entsorgen Sie die Folie und putzen Sie die Zähne.

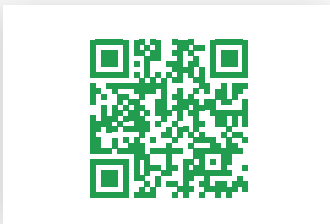

Scannen Sie den QR-Code, um sich das Anwendungsvideo anzuschauen.

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Eine kosmetische Zahnaufhellung bei Personen unter 18 Jahren ist gesetzlich nicht zulässig.
- Die Produkte des Opalescence Zahnaufhellungssystems dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schwangere oder stillende Frauen oder Patient:innen mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen sollten keine Zahnaufhellung durchführen lassen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihr medizinisches Fachpersonal.
- Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum und schützen Sie das Zahnaufhellungsgel vor Sonneneinstrahlung und Hitze. Kühl lagern. Nicht einfrieren.
- Zahnaufhellungsgel nicht schlucken.
- Kronen, Brücken, Teilprothesen, Veneers und Kompositfüllungen können nicht aufgehellt werden.
- Manche Amalgam- oder „Silber“-Füllungen können die Trays dunkelviolett verfärben. Das ist normal.
- Regelmäßige zahnärztliche Kontrollen und Reinigungen vor und nach einer Zahnaufhellung sind wichtig für ein gesundes Lächeln.

HINWEISE ZUR ZAHNAUFHELLUNG:

- Hellen Sie die Zähne nie mit Bleichmitteln für den Haushaltsgebrauch auf.
- Bei Fragen zur sachgemäßen Anwendung dieses Produkts sowie zur Dauer der Aufhellungsbehandlung, wenden Sie sich bitte an Ihr zahnärztliches Fachpersonal.
- Verzichten Sie auf den Konsum von Tabakwaren und Lebensmitteln solange Sie die Trays im Mund tragen.
- Bei manchen Patient:innen kann es während der Aufhellungsbehandlung zu Empfindlichkeiten kommen. In diesem Fall unterbrechen Sie die Behandlung unverzüglich und kontaktieren Sie Ihr zahnärztliches Fachpersonal.
- Bei manchen Patient:innen kommt es zu vorübergehenden Beschwerden im Bereich von Zahnfleisch, Lippen, Rachen oder Zunge. Falls diese Symptome länger als zwei Tage andauern oder sich kontinuierlich verschlechtern, wenden Sie sich an Ihr zahnärztliches Fachpersonal. Diese Nebenwirkungen klingen normalerweise innerhalb von ein bis drei Tagen nach dem Abbruch der Behandlung ab.
- Durch den Konsum von Kaffee, Tabak und anderen Produkten können sich Ihre Zähne im Laufe der Zeit erneut verfärben. In diesem Fall können Sie Ihre Zähne innerhalb weniger Tage erneut mit dem Opalescence Aufhellungsgel aufhellen.
- Weiße Flecken, die während der Behandlung auf dem Schmelz erscheinen, können im Laufe der weiteren Behandlung wieder abklingen.
- Die Zähne sind von Natur aus am Zahnfleischrand etwas dunkler. In diesen Bereichen kann die Aufhellung länger dauern als auf der restlichen Zahnoberfläche. Normalerweise bleiben diese Bereiche etwas dunkler.

Bitte halten Sie die Kontrolltermine ein, die wir mit Ihnen vereinbart haben.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an uns, wir informieren Sie gern!