

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem  
Fachhändler oder  
auf [wh.com](http://wh.com)



# Piezomed Hygieneleitfaden

**Gereinigt, gepflegt, sterilisiert.**

Ein Leitfaden für den Weg Ihrer Handstücke,  
Instrumente und Ihres Steuergeräts durch  
den Wiederaufbereitungskreislauf.



piezomed

# 1 ERSTBEHANDLUNG AM GEBRAUCHSORT



## 1.1 Handschuhe

## 1.2 Instrument abnehmen

Nehmen Sie das Instrument vom Handstück ab und legen Sie es in Desinfektionsmittel ein.

## 1.3 Piezomed Handstück abnehmen

Nehmen Sie das Piezomed Handstück mit Kabel ab

## 1.4 Vordesinfektion

Wischen Sie das Piezomed Handstück mit Kabel, die Motorlage und das Stativ mit Desinfektionsmittel ab.

## 1.5 Zerlegen

Schrauben Sie die Außenhülse vom Piezomed Handstück ab und entfernen Sie den LED Sockel.

# 2 AUFBEREITUNG


## Reinigung und Desinfektion

MASCHINELL

### Reinigung und Desinfektion



Einlegen des Handstückes samt Zubehör in den Siebkorb

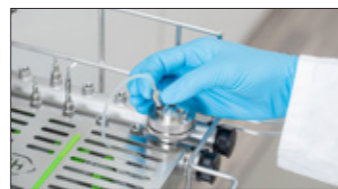

Anschließen des Kühlmittelrohrreinigerschlauhs an das Handstück



Aufschrauben der Piezomed Instrumente auf den Adapter des Thermodesinfektor

## ODER

MANUELL

### Reinigung



Piezomed Instrumente einzeln oder im Instrumentenclip in Ultraschallbad



Abbürsten und Abspülen des zerlegten Handstückes mit Kabel, Universalablage und Instrumentenwechsler



1. Durchspülen des Kühlmittelrohres mittels einer Spülnadel  
2. Ab- und Durchspülen der Instrumente und des Instrumentenclips

### Desinfektion



Einzelteile des Piezomed Handstückes unter Beachtung der Einwirkzeit des Desinfektionsmittels, desinfizieren

## 2.1



## 2.2



**Trocknung**  
Trocknung der einzelnen Teile mittels Druckluft

## 2.3



**Kontrolle, Pflege und Prüfung**  
Sichtprüfen Sie die einzelnen Teile auf Beschädigung oder Restverschmutzung

## 2.4



**Zusammensetzen der Einzelteile**  
Setzen Sie das Handstück mit Kabel wieder zusammen

## 2.7



## Lagerung

Lagern Sie die sterilisierten Produkte bei Raumtemperatur staubfrei, trocken, vor Kontamination- und Sonneneinstrahlung geschützt.


## 2.6



## Sterilisation

Sterilisation in Klasse B Sterilisator

## 2.5

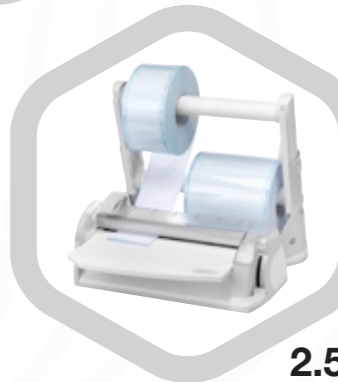

## Verpackung

Verpacken der Sterilisationskassette oder Einzelteile in Sterilisationsfolie

