



Komfortabel:

Optimaler Zugang
und praktische Isolation!





Umbrella™

TONGUE, LIP, & CHEEK RETRACTOR

Der neue Umbrella™ Retraktor sorgt für ein übersichtliches Behandlungsfeld und einen herausragenden Patientenkomfort. Er bietet weit mehr als die reine Retraktion des Weichgewebes:



- Einfache Positionierung
- Einwegartikel
- Natürliche, sanfte Öffnung des Mundes – ganz ohne Ziehen oder Dehnen der Lippen
- Dank des innovativen Designs liegt die Zunge bequem hinter dem Zungenschutz und damit fern des Arbeitsfeldes
- Die anatomisch geformten Halter bieten eine Ablagemöglichkeit für die Arbeitshand, ohne dem Patienten Beschwerden zu bereiten
- Entspannt und komfortabel: löst bei den meisten Patienten keinen Würgereiz aus
- Kann während der Bisskontrolle in Position verbleiben

Woher weiß ich, welche Größe die richtige ist?

- Wenn Sie für den Patienten einen Abformlöffel der Größe XS, S oder M verwenden würden, nehmen Sie einen mittleren Wangenhalter.
- Wenn Sie für den Patienten einen Abformlöffel der Größe L oder XL verwenden würden, nehmen Sie einen großen Wangenhalter.
- Im Zweifelsfall die größere Variante wählen.



SCHRITT 1.

Zur Vorbereitung auf das Einsetzen im Mund drücken Sie die Laschen des Umbrella Zungen-, Lippen und Wangenhalters zusammen. Achten Sie darauf, dass die Pfeile der oberen Lasche aufwärts gerichtet sind.



Den Retraktor nicht umgedreht einsetzen.



SCHRITT 2.

Bitten Sie den Patienten, die Zungenspitze am Gaumen anzulegen.



SCHRITT 3.

Führen Sie Umbrella zuerst auf einer Seite des Mundes und danach ganz bequem auf der anderen Seite ein.



SCHRITT 4.

Mit Hilfe der Laschen zentrieren Sie den Retraktor im Mund des Patienten.



SCHRITT 5.

Überprüfen Sie, ob die Zunge des Patienten bequem hinter dem Zungenschutz liegt und ein einfacher Zugang gewährleistet ist.



Positionieren Sie den Zungenschutz nicht auf der Zunge des Patienten.

4870 - Umbrella Retractor Medium 5 St.
5 x Umbrella Retraktoren

4871 - Umbrella Retractor Medium 20 St.
20 x Umbrella Retraktoren

5162 - Umbrella Retractor Medium 40 St.
40 x Umbrella Retraktoren

5256 - Umbrella Retractor Large 5 St.
5 x Umbrella Retraktoren

5257 - Umbrella Retractor Large 20 St.
20 x Umbrella Retraktoren

5258 - Umbrella Retractor Large 40 St.
40 x Umbrella Retraktoren

Folgen Sie uns!



de.ultradent.blog

UPP 732-DE 05-2022

© 2022 Ultradent Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ULTRADENTPRODUCTS.COM

